




# LACRYCLEAN

Dispositif tout en 1 pour lavage des voies lacrymales

EN VENTE SUR  
[www.ophtaboutique.fr](http://www.ophtaboutique.fr)

- Désignation : Solution de lavage
- Composition : Hyaluronate de sodium 0.9%
- Présentation : réservoir 10ml + canule + dilatateur
- Conservation : Température ambiante

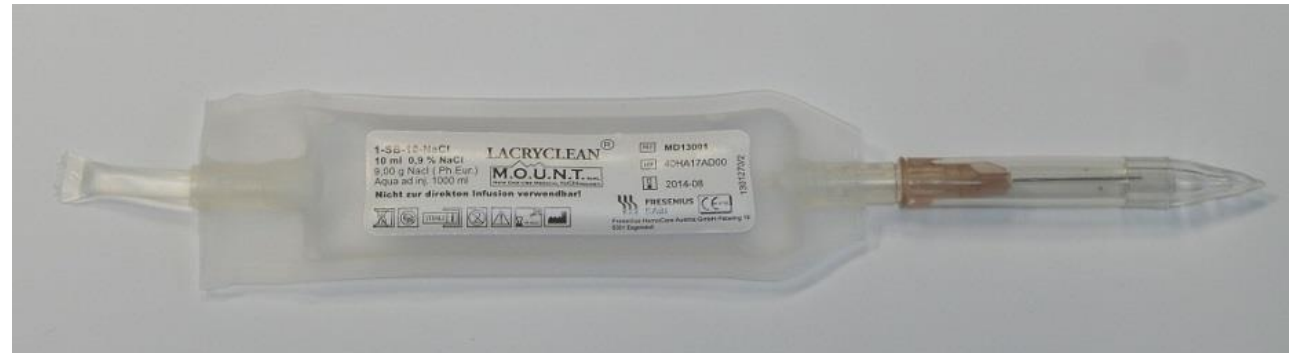

- Classe : IIa
- Fabricant : FRESENIUS
- CE : 0123

2871 avenue de l'Europe – 69140 RILLIEUX LA PAPE – Tel : 06 61 80 22 22 – Fax : 04 82 53 15 82  
[www.toreasy.com](http://www.toreasy.com) – [info@toreasy.com](mailto:info@toreasy.com)






# LACRYCLEAN

Dispositif tout en 1 pour lavage des voies lacrymales

EN VENTE SUR  
[www.ophtaboutique.fr](http://www.ophtaboutique.fr)

- Désignation : Solution de lavage
- Composition : Hyaluronate de sodium 0.9%
- Présentation : réservoir 10ml + canule + dilatateur
- Conservation : Température ambiante

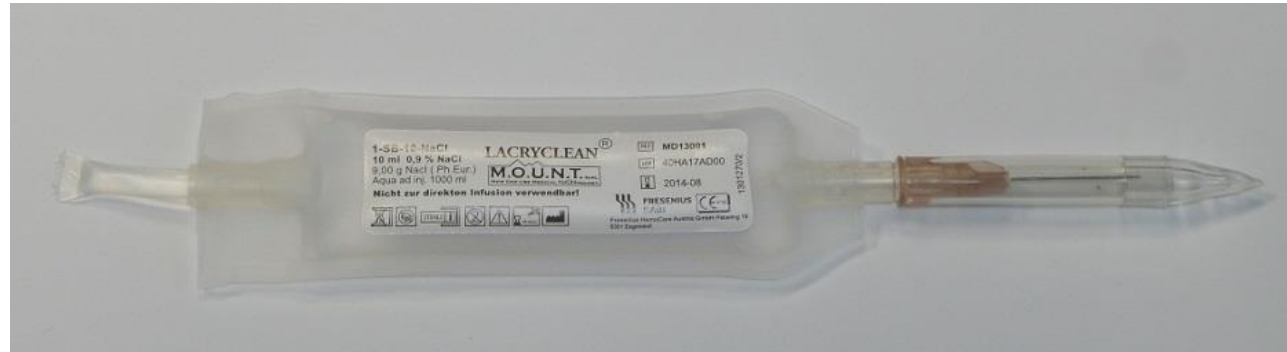

- Classe : IIa
- Fabricant : FRESENIUS
- CE : 0123

2871 avenue de l'Europe – 69140 RILLIEUX LA PAPE – Tel : 06 61 80 22 22 – Fax : 04 82 53 15 82  
[www.toreasy.com](http://www.toreasy.com) – [info@toreasy.com](mailto:info@toreasy.com)





# LACRYCLEAN

## Dispositif tout en 1 pour lavage des voies lacrymales : conseils d'utilisation




1 – Commencer par introduire le dilatateur délicatement et au maximum dans l'orifice lacrymal afin de la dilater suffisamment.



2 – Casser la plaquette de fermeture pour libérer le sérum physiologique.

3 – Retirer le tube de protection.

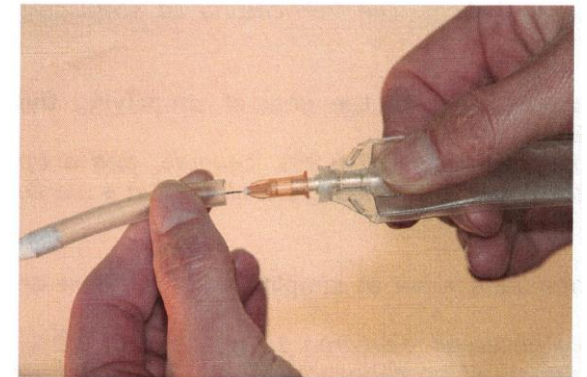

4 – L'injection du sérum physiologique permet de confirmer la perméabilité des voies lacrymales par l'injection de liquide dans les fosses nasales.






# LACRYCLEAN

## Dispositif tout en 1 pour lavage des voies lacrymales : conseils d'utilisation




1 – Commencer par introduire le dilateur délicatement et au maximum dans l'orifice lacrymal afin de la dilater suffisamment.

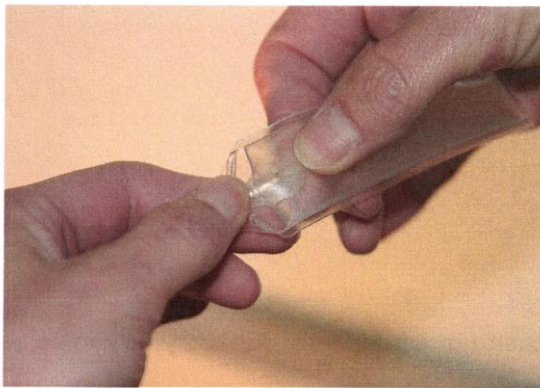

2 – Casser la plaquette de fermeture pour libérer le sérum physiologique.

3 – Retirer le tube de protection.

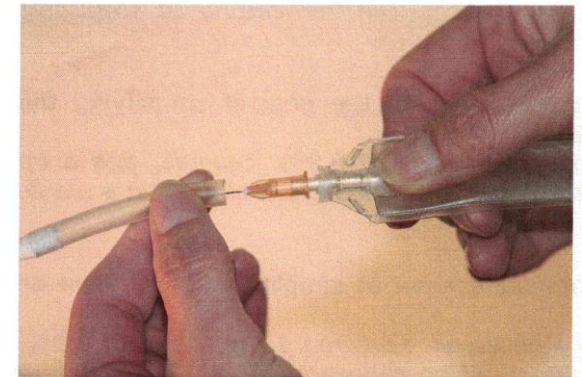

4 – L'injection du sérum physiologique permet de confirmer la perméabilité des voies lacrymales par l'injection de liquide dans les fosses nasales.

